

ISTRUZIONI D'USO

Indicazioni di utilizzo:

- Chiusura rapida del morso aperto anteriore e laterale.
- Prevenzione di un posizionamento viziato latero-anteriore della lingua.
- Nel morso aperto laterale (Fig. 2A, 2B), ingaggiando su premolari e molari gli elastici da 1/4", 6oz. per crossbite

Quando utilizzarlo:



- Sia in pazienti in crescita sia in adulti, con l'utilizzo di ortodonzia fissa;
- Successivamente al bonding dei brackets.

Come funziona:

- Come nel riflesso automatico al caldo, la lingua, in contatto con le protrusioni, si ritrae da una posizione viziata grazie al meccanismo di risposta alla condizione negativa (fig. 3). Tali protrusioni non sono taglienti né per la lingua, né per i guanti o la pelle dell'operatore.

Dove posizionarli:

- Sui superiori e sugli inferiori da 3-3 sempre dal lato linguale.
- Posizionare appena sotto il centro della corona per consentire la chiusura completa del morso (Fig. 4)
- Su premolari e molari per il morso aperto laterale.

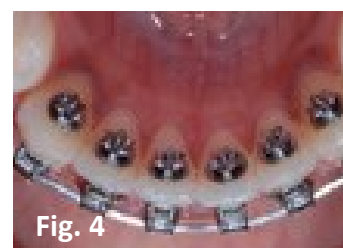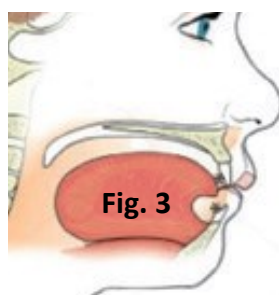

DIRECTIONS FOR USE

Directions for use:

- Rapid Anterior and Lateral Open Bite Closure.
- Prevents anterior-lateral tongue positioning.
- In lateral open bites (Fig. 2A, 2B), undercuts are useful additionally for 1/4", 6oz heavy crossbite elastics at bicuspid, molars.

When to place:

- In early and adult treatments with orthodontic brackets.
- At the second appointment after brackets have been placed.

How it works:

- Tongue retracts from forward positioning by using a negative conditioning response, similar to a hot-stove reflex of the tongue (fig. 3). These protrusions are not sharp and do not cut tongue, or operator's gloves or skin.

Where to place:

- Palatal of upper anteriors 3 to 3 and Lingual of lower anteriors 3 to 3, bonded just below the center of the crown to allow open bite closure (Fig. 4)
- Bonded to the bicuspid and molars for lateral open bites

